

Prima dell'utilizzo leggere le istruzioni d'uso.



**MULTI-REG®**

## DISPOSITIVO MEDICO DI REGISTRAZIONE OCCLUSALE



MULTI-REG® è un dispositivo di registrazione e di deprogrammazione occlusale, messo a punto dal Prof. Stefano Pagano e dal Dott. Francesco Tortorella utile in molti ambiti odontoiatrici tutte le volte che sia necessario definire, in maniera stabile e riproducibile, una registrazione occlusale definita.

Materiale fotopolimerizzabile, disponibile in placche preformate e può essere fotopolimerizzato con tutti gli apparecchi a luce UV o alogena. Le placche preformate sono fornite in una scatola impervia alla luce, riutilizzabile come container per trasporto o conservazione dei modelli etc.



Pezzi: 20 | Gusto: Menta | Colore: Azzurro



FASE 1

Adattare la placca sull'arcata inferiore del paziente dopo aver accuratamente eliminato gli eccessi salivari, con le dita adattare il materiale sui denti (preferibilmente solo sulla zona occlusale) cercando di non premere eccessivamente.



FASE 2

Far chiudere la mandibola, effettuare la registrazione, e poi procedere con la polimerizzazione, inizialmente in regione molare e poi zona incisale. Completare la polimerizzazione dell'intera arcata in senso vestibolare, dopodiché far riaprire la mandibola, ripetere apertura/chiusura un paio di volte e poi polimerizzare i versanti linguali.



FASE 3

Rifinire, se necessario i bordi della registrazione/placca ottenuta con una fresa al carburo di tungsteno e levigare con carta abrasiva.



BART MEDICAL S.R.L.  
Viale Vincenzo Randi 118  
48124 Ravenna (RA) - Italy  
+39 0544 523326  
sales@bartmedical.com  
www.bartmedical.com



H 317



Seguici su:

